



Grand Healthcare
Fabricante de Equipos Médicos

Colchón Antiescaras Aries Effect 2500F

Manual de Operación

“ **Nuevo** Diseño **Control de humedad promueve una piel seca y sana.** ”



IMPORTANTE


Leer detenidamente el contenido completo de este manual antes de utilizar este equipo. Guarde estas instrucciones. Visite nuestro canal de YouTube digitando "Grand Healthcare" o busque el video de este modelo como: Grand Healthcare sistema de colchoneta y compresor Aries Effect 2500; Donde se instruirá del funcionamiento de este producto

1 INTRODUCCIÓN

Este manual debe ser utilizado para una instalación inicial y como referencia posterior.

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2.1 COMPRESOR

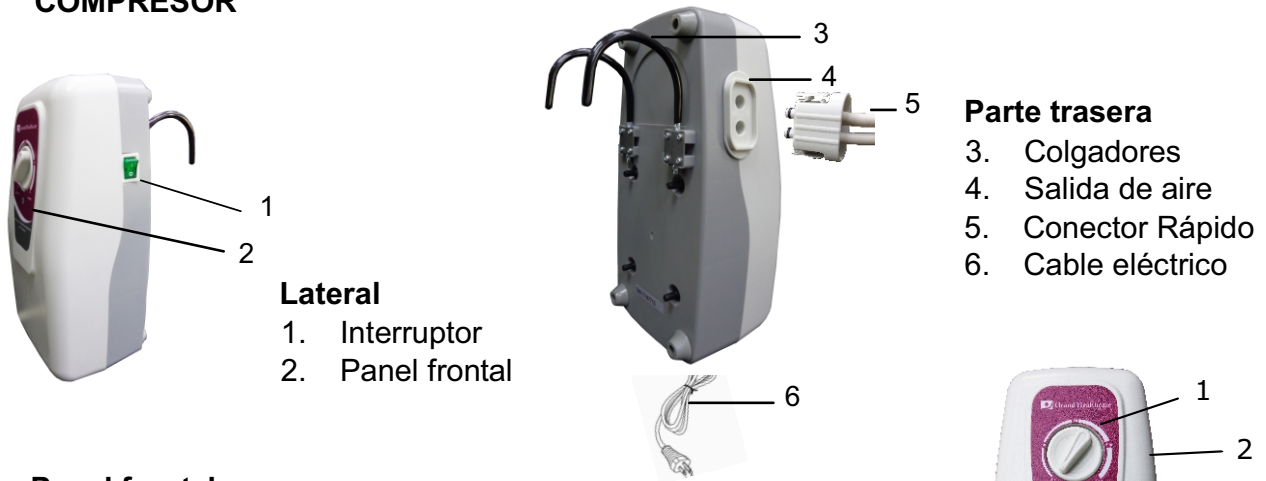

2.2 Panel frontal

1. Regulador de presión

Controla la salida de presión de aire. Si la gira en sentido de las agujas del reloj, la presión incrementará.

Por otro lado si la gira en sentido contrario a las manillas del reloj, la presión reducirá.

2. Interruptor principal

Para encender / apagar el compresor.

3 INSTALACIÓN

Desembale el equipo para comprobar cualquier daño que haya podido ocurrir durante envío. En caso de daños, contacte inmediatamente con el punto de venta donde adquirió el equipo.

1. Coloque la colchoneta de aire encima del colchón de la cama. Sujete la colchoneta a la cama colocando debajo del colchón las solapas superior e inferior de la colchoneta, para que no se deslice por el movimiento realizado al descansar.



NOTA: Para mayor comodidad y confort para el paciente cubrir el colchón con una sabana de algodón para el contacto directo con la piel.

2. Colgar el compresor de la barandilla o del piecero de la cama y ajustar los colgadores para que quede fijado en posición vertical o posicionarlo en una superficie plana.
3. Conecte la salida/entrada de aire del colchón al compresor por medio del "CONECTOR RÁPIDO" suministrado especialmente en este modelo LIBRA




1 INTRODUCCIÓN

Este manual debe ser utilizado para una instalación inicial y como referencia posterior.

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2.1 COMPRESOR

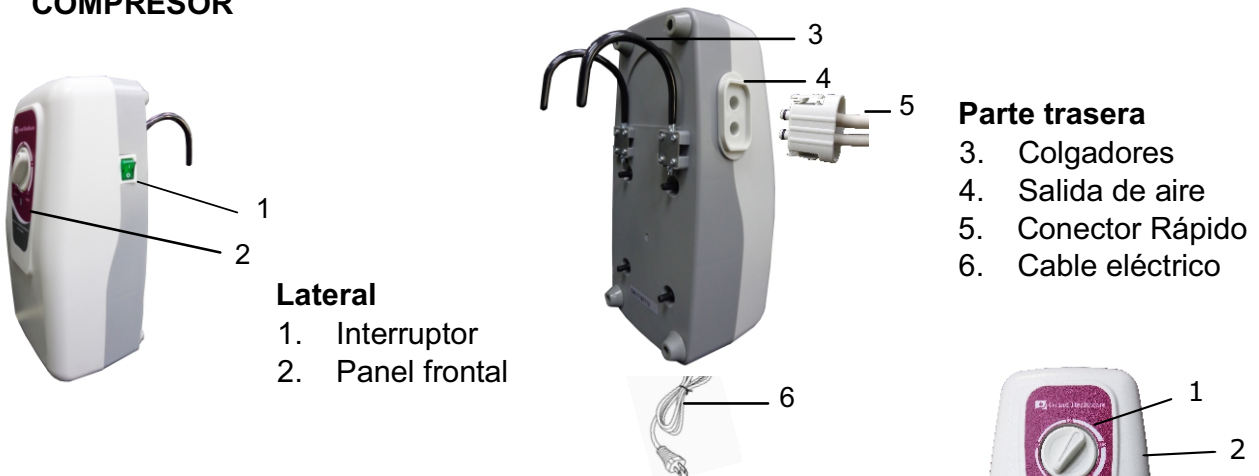

Lateral

1. Interruptor
2. Panel frontal

Parte trasera

3. Colgadores
4. Salida de aire
5. Conector Rápido
6. Cable eléctrico

Frontal

1. Regulador de Presión
2. Interruptor de Encendido y Apagado

2.2 Panel frontal

1. Regulador de presión

Controla la salida de presión de aire. Si la gira en sentido de las agujas del reloj, la presión incrementará.

Por otro lado si la gira en sentido contrario a las manillas del reloj, la presión reducirá.

2. Interruptor principal

Para encender / apagar el compresor.

3 INSTALACIÓN

Desembale el equipo para comprobar cualquier daño que haya podido ocurrir durante envío. En caso de daños, contacte inmediatamente con el punto de venta donde adquirió el equipo.

1. Coloque la colchoneta de aire encima del colchón de la cama. Sujete la colchoneta a la cama colocando debajo del colchón las solapas superior e inferior de la colchoneta, para que no se deslice por el movimiento realizado al descansar.



NOTA: Para mayor comodidad y confort para el paciente cubrir el colchón con una sabana de algodón para el contacto directo con la piel.

2. Colgar el compresor de la barandilla o del picero de la cama y ajustar los colgadores para que quede fijado en posición vertical o posicionarlo en una superficie plana.
3. Conecte la salida/entrada de aire del colchón al compresor por medio del "CONECTOR RÁPIDO" suministrado especialmente en este modelo LIBRA





ADVERTENCIA: No sumerja en líquido ni moje el compresor. Pase un trapo húmedo con agua templada (no exceda de 65°C) y detergente suave por el colchón. No utilizar productos basados en alcohol / componentes fenólicos. Deje que el colchón se seque al aire después de su limpieza. No exponga el colchón al sol directo de forma prolongada

6 ALMACENAJE

Para colchones de celdas:

1. Para almacenar el colchón, extiéndalo a lo largo o boca abajo.
2. Enrollar desde el cabezal hacia el otro extremo del colchón.
3. Una vez enrollado, envolver el colchón con una cinta para evitar que se desenrolle.
4. Doble el colchón como el método original.

7 MANTENIMIENTO

1. Asegúrese de que el cable y enchufe se encuentren en buen estado.
2. Compruebe el estado de la cubierta. Asegúrese que la cubierta junto con los tubos estén almacenados correctamente.
3. Compruebe el flujo de aire de los tubos. El flujo de aire debe alternar entre los dos conectores.
4. Asegúrese que las salidas de aire no estén rotas o dañadas.
Para su sustitución contactar con el punto de venta donde adquirió el sistema.

8 USO PREVISTO

Este producto está destinado:

- . A ayudar y reducir la incidencia de las úlceras por presión mientras optimiza la comodidad del paciente.
- . A la atención domiciliaria a largo plazo de pacientes que sufren de úlceras por presión.
- . Al manejo del dolor según prescripción médica.

9 GARANTIA

La garantía incluye la atención de este producto por el término de (1) año, a partir de la compra por el usuario, haciéndose responsable de reparar y/o cambiar cualquier pieza que muestre fallas en condiciones normales de funcionamiento, o presente cualquier defecto de fabricación.

La garantía caduca si:

- . La etiqueta con el número de serie no es legible y por lo tanto no puede reconocerse el producto.
- . Se presenta un daño en la colchoneta o el compresor por la utilización de conectores o conexiones indebidas entre ellos o hacia otros dispositivos.
- . Tiene una pinchadura en la colchoneta por cualquier tipo de elemento corto punzante.
- . El equipo evidencia golpes, roturas, caídas, ralladuras o cualquier daño no atribuible al desgaste natural en el uso.
- . Recibe un trato inadecuado.
- . No se cumple con las pautas de uso, limpieza y mantenimiento indicadas en el manual de uso.
- . Se evidencia intento de reparación o desarmado del equipo por personas no autorizadas.
- . El compresor es conectado a circuitos que operan con sobretensión o baja tensión o cualquier variación de energía que produzca mal funcionamiento en condiciones anormales.
- . La garantía no está sellada y acompañada por la factura de compra, si se observan enmiendas o raspaduras en el certificado de garantía y/o factura de compra.

NOTA: Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslados se registrarán por la ley 1480 de 2011. El equipo será reparado en un término no mayor a 30 días según lo establece la ley 1480 de 2011.