



Grand Healthcare
Fabricante de Equipos Médicos

Cojín de aire Antiescaras de uso Clínico

Manual del Usuario



IMPORTANTE: Leer detenidamente el contenido completo de este manual antes de utilizar este equipo. Guarde estas instrucciones.



1 INTRODUCCIÓN

Las celdas de aire de este cojín permiten reducir la presión del cuerpo, facilitando la circulación sanguínea y evitando la formación de úlceras o escaras. Los cojines antiescaras están especialmente diseñados para usuarios que tienen un riesgo elevado de padecer escaras al pasar la mayor parte de su tiempo sentados.

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las celdas son neumática e individualmente deformables, para aliviarle la presión en las zonas sensibles. Se adaptan perfectamente a la forma del cuerpo en cada movimiento del paciente. Las celdas están conectadas entre si para que el aire circule entre ellas, lo que hace que la presión del cuerpo en contacto con el asiento disminuya y se reparta, facilitando la circulación de la sangre. Además ayudan a conseguir una postura adecuada.

Incluye una funda transpirable de poliéster y un kit de reparación mas una bomba para inflarlo que nos ayudara a tener el cojín siempre a punto para nuestras necesidades.

3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este producto es eficaz terapéuticamente en:

- **Alivio de presión:** Gracias a sus celdas interconectadas que permiten una optima adaptación al paciente.
- **Regula la temperatura:** Este diseño de celdas permite el paso de un flujo de aire entre las mismas, regulando la temperatura y la humedad.
- **Reduce la Fricción:** Incluye una funda hecho de tela de poliéster que evita que la superficie del cojín sobresalga del asiento y que este se deslice.

Peso del cojín: 1,5 Kg **Peso máximo del usuario:** 150 Kg **Dimensiones:** 45 x 40 x 6cm



4 FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el cojín en la silla, gire la válvula en sentido contrario de las agujas del reloj para abrir.

2. Conecte el tubo de silicona en la bomba de mano y el otro extremo en la válvula, e inflar hasta que el cojín se arquee ligeramente.

3. Gire la válvula en el sentido de las agujas del reloj para cerrar y retire la bomba (repetir los pasos 1-3 con ambas válvulas).



4. Cuando el cojín este completamente inflado, coloque el usuario sobre el cojín en la posición normal de sentado con los brazos y pies descansando en la posición apropiada.



5. Coloque su mano entre el cojín y la parte mas profunda donde sienta la prominencia osea.

6. Con su mano en posición, suavemente gire la válvula en el sentido contrario a las agujas del reloj para liberar un poco de aire hasta que el usuario quede inmerso en el cojín. La distancia de la base del cojín al isquion debe ser de 1,5 a 2cm.



5 INTRODUCCIONES DE LIMPIEZA

Cojín: Use jabón anti bacterial para lavar el cojín. Use paños de limpieza para secar el cojín en el aire. No use detergentes u otros solventes. No seque con secadoras de aire caliente. No limpie con vapor.

Funda: Lave 1 30°C y No planche. Por razones de higiene cada cojín debe ser de uso individual. Le sugerimos que usted compre otra funda para usar como remplazo de la primera mientras esta se este lavando para evitar contacto directo entre el usuario y el cojín sin la funda.

6 REPARACION DE PINCHADURAS

- a. Asegurese que el cojín este inflado completamente.
- b. Retire la funda y sumerja el cojín en agua para localizar la pinchadura.
- c. Cuando la pinchadura haya sido localizada, marque el lugar de la pinchadura insertando en el orificio un palillo de dientes.
- d. Saque el cojín del agua y desinflelo completamente y dejelo secar muy bien, luego quite el palillo del orificio y limpie el área al rededor del orificio y asegurese que este bien seca.
- e. Coloque el parche sobre el orificio, presione hacia abajo el parche firmemente para lograr un buen sellado.
- f. No use e l cojín durante los próximos 30 minutos.
- g. Cuando vaya a usar el cojín nuevamente siga las instrucciones del manual para ajustar adecuadamente el inflado del mismo.

Los parches no cambian el rendimiento del cojín, pero si su reparación no resulta exitosa, o si se trata de un daño mas grave, por favor contacte a su distribuidor local.



6 cm



10 cm

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Altura	1 Valvula	2 Valvulas	Tamaño
6cm	P06-4040-1	P06-4040-2	40x40x6cm
	P06-4540-1	P06-4540-2	45x40x6cm
	P06-4545-1	P06-4545-2	45x45x6cm
	P06-5045-1	P06-5045-2	50x45x6cm
10cm	P10-4040-1	P10-4040-2	40x40x10cm
	P10-4540-1	P10-4540-2	45x40x10cm
	P10-4545-1	P10-4545-2	45x45x10cm
	P10-5045-1	P10-5045-2	50x45x10cm

7 USO PREVISTO

- . A ayudar y reducir la incidencia de las úlceras por presión mientras optimiza la comodidad del paciente.
- . A la atención domiciliaria a largo plazo de pacientes que sufren de úlceras por presión.
- . Al manejo del dolor según prescripción médica.

8 GARANTÍA

La garantía incluye la atención de este producto por el término de (1) año, a partir de la compra por el usuario, haciéndose responsable de reparar y/o cambiar cualquier pieza que muestre fallas en condiciones normales de funcionamiento, o presente cualquier defecto de fabricación.

La garantía caduca si:

- . Recibe un trato inadecuado.
- . No se cumple con las pautas de uso, limpieza y mantenimiento indicadas en el manual de uso.
- . La garantía no está sellada y acompañada por la factura de compra, si se observan enmiendas o raspaduras en el certificado de garantía y/o factura de compra.

NOTA: Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslados se registrarán por la ley 1480 de 2011. El equipo será reparado en un término no mayor a 30 días según lo establece la ley 1480 de 2011.

9 ACTUACIÓN:

El cojín de flotación de aire fabricado por Grand Healthcare le hará sentir un estado cómodo al distribuir la presión sobre tu cadera de manera uniforme ya que ha sido diseñado teniendo en mente la anatomía del cuerpo humano y en especial los pacientes que tienen un riesgo muy alto de padecer úlceras por presión. Las celdas de aire independientes proporcionan una postura corporal más equilibrada y estable sin producir el efecto de mareo. Es un cojín recomendado tanto para quienes padecen de úlceras por presión como para quienes quieren prevenirla. Indicado para ancianos, oficinistas, conductores de autos, personas que deben permanecer largos periodos de tiempo sentados, etc.

ATENCIÓN:

Antes de usar lea bien el manual del usuario.

Por favor, preste atención a la posición en contacto con la parte inferior del cojín, que puede producir un fenómeno de deslizamiento. Úselo con precaución.

Por favor no use elementos cortos punzantes en contacto con el cojín.

Manténgalo alejado del fuego y ambientes húmedos.

No doble ni pliegue el cojín cuando este inflado.

Si alguna parte de su cuerpo toca la base del cojín es por que mucho aire ha sido liberado lo cual puede reducir el efecto terapéutico del mismo.

Revise el cojín a diario para asegurarse que el usuario no toque fondo.

Por favor mantenga este cojín y sus accesorios en un ambiente seco.