



Grand Healthcare
Fabricante de Equipos Médicos

Cojín Antiescaras de Espuma de Latex

Manual del Usuario



IMPORTANTE: Leer detenidamente el contenido completo de este manual antes de utilizar este equipo. Guarde estas instrucciones.



1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este nuevo diseño de cojín anti-escaras para silla de ruedas fabricado por Grand Healthcare en Espuma de Latex, le ayuda a conseguir la posición óptima en sedentación, aportando estabilidad postural y una re distribución óptima de la presión a la vez que se tienen en cuenta las necesidades clínicas individuales de cada paciente. Estabilidad, distribución de presión, facilidad de uso y confort al mas alto nivel.


El cojín con base contorneada pélvica permite una mayor inmersión de las tuberosidades isquiáticas (entre 2 y 3 cm) ofreciendo mayor comodidad y protección de la piel frente a escaras..

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gracias a su forma anatómica este cojín ofrece además soporte a nivel de fémur y trocánteres para estabilidad pélvica lateral y antero-posterior.

La base del cojín incorpora perforaciones en la parte trasero central para alivio de la presión en el sacro/coxis que aumenta el confort del usuario.

La Espuma de Látex brinda una sensación térmica de fresca debido a su composición y a las perforaciones, también tiene un alto punto de elasticidad y ofrece una comodidad muy alta comparada con productos similares que se encuentran en el mercado.

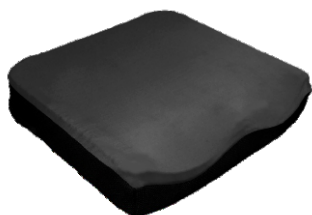

Peso del cojín: 1200Gr/1500Gr

Peso máximo del usuario: 110 Kg

Dimensiones: 40 X 40 X 8 cm (modelo GU16162)

45 X 40 X 8 cm (modelo GU18162)

4 FUNCIONAMIENTO

Coloque el cojín en la silla, y utilicelo normalmente, para hacer lavado de la funda utilice un jabón líquido anti bacterial, no utilice plancha, no meta el cojín de espuma en la lavadora por que puede romperse.

5 GARANTÍA

La garantía incluye la atención de este producto por el termino de diez (10) días, a partir de la compra por el usuario, haciendose responsable de reparar y/o cambiar cualquier pieza que muestre fallas en condiciones normales de funcionamiento, o presente cualquier defecto de fabricación.

La garantía caduca si:

- . Recibe un trato inadecuado.
- . No se cumple con las pautas de uso, limpieza y mantenimiento indicadas en el manual de uso.
- . La garantía no esta sellada y acompañada por la factura de compra, si se observan enmiendas o raspaduras en el certificado de garantía y/o factura de compra.

NOTA: Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslados se regirán por la ley 1480 de 2011. El equipo sera reparado en un termino no mayor a 30 días según lo establece la ley 1480 de 2011.