

Desarrollado para el **prelavado de dispositivos médicos, equipos biomédicos, insumos e instrumental** que hagan parte de procedimientos. Limpia y desinfecta en un solo paso colchonetas y colchones antiescaras, cojines, sillas de ruedas, camas clínicas y superficies. Ideal para el tratamiento de derrames.

BENEFICIOS

- Inicio de acción inmediato. Efecto **bactericida, virucida y fungicida**, y actividad contra priones.
- Su **pH alcalino actúa sobre la estructura interna de la biocapa**, optimizando sus propiedades de limpieza.
- **No se inactiva en presencia de materia orgánica.**
- La humectación inicial del instrumental **inhibe el primer paso de la formación de la biocapa.**
- Rendimiento total de **1.000 aplicaciones** por frasco activado.

COMPOSICIÓN

Enzimas proteolíticas · agentes absorbentes del calcáreo · agentes tensoactivos no iónicos · cloruro de didecildimetilamonio (amonio cuaternario de quinta generación).



PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco de **550 ml** con dispensador de gatillo.

Solución lista para usar después de activarla con 500 ml de agua.

REGISTRO SANITARIO

INVIMA **2017DM-0016112**

No tóxico
No irritante

No corrosivo
No mancha

Use elementos de
protección personal

Uso
hospitalario

Biodegradable
Amigable con el
ambiente

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Actividad	Ensayo	Microorganismo	Tiempo de contacto
Bactericida	EN 1040	Pseudomonas aeruginosa (0,05%) · Staphylococcus aureus (0,035%)	5 min
	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa (0,5%) · Staphylococcus aureus (0,5%) · Enterococcus hirae (0,5%)	15 min
	NF T 72-301	Pseudomonas aeruginosa (0,5%) · Staphylococcus aureus (0,5%) · Escherichia coli (0,5%) · Klebsiella pneumoniae (0,5%) · Acinetobacter baumannii (0,5%) · Enterococcus hirae (0,25%)	15 min
	NF T 72-171	Klebsiella pneumoniae (1%) · Acinetobacter baumannii (1%) · Escherichia coli (1%) · Candida albicans (0,5%)	5 min
Fungicida	EN 1275	Candida albicans (0,5%) · Penicillium verrucosum (0,5%) · Cladosporium cladosporioides (0,5%)	15 min
	NF T 72-301	Candida albicans (0,25%)	15 min
	EN 13624	Cladosporium cladosporioides (1%) · Candida albicans (1%) · Penicillium verrucosum (1%)	5 min
	AOAC 955.15	Cyclophium (1%)	Acción inmediata
Virucida	AFNOR NF T 72-180	Hepatitis B (HBV) y Hepatitis C (HCV) al 1% · VIH-1 (0,5%)	5 min
	EUCAST 2011	Morbilivirus (ATCC CCL-34) · Paramyxoviridae	5 min
	CLSI 2012	Parvovirus (ATCC VR-2209) · Parvoviridae al 0,05%	5 min
Esporicida	NF T 72-231	Bacillus subtilis (0,5%) — remoción de esporas	2 min
Contra priones	Referenciado	Kimberli & Walker (1967) · Adjou et al. (1995) · Lasmézas et al. (1996) · ATNC 263K (0,5%)	5 min

Datos de ensayo reportados por el fabricante. Las concentraciones entre paréntesis corresponden a la carga de materia orgánica del ensayo.

Tratamiento de derrames



1

Use guantes. Aplique BioSafe generosamente sobre la superficie a tratar, directamente.



2

Deje actuar 5 minutos y retire con toallas de papel o con el material indicado por el protocolo.



3

Deposite las toallas empleadas en las canecas rojas de riesgo biológico.



4

Enjuague con abundante agua la zona donde aplicó el detergente.

Limpeza inicial de superficies con carga biológica



1

Identifique el área o superficie contaminada con materia orgánica sobre la que va a realizar la limpieza inicial.



2

Aplique directamente sobre la zona o sobre un paño no tejido. Distribuya de forma uniforme y en sentido unidireccional.



3

Deje actuar 5 minutos y retire con agua, conservando la técnica para remover el producto.



4

Continúe el proceso de desinfección según el protocolo institucional.

Dónde se usa

Colchonetas y colchones antiescaras, incluidas las celdas de aire y el forro · cojines antiescaras de aire, espuma y gel · sillas de ruedas y sillas de baño · camas clínicas, barandas y mesas auxiliares · instrumental y materiales biomédicos · superficies de contacto en el cuarto del paciente.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su liberación al medio ambiente. Se recomienda el uso de guantes y, según el procedimiento, gafas o mascarilla. **En caso de contacto con la piel:** lavar con abundante agua. **En caso de contacto con los ojos:** enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos; quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad, y proseguir con el lavado.

Sobre vinilo y PVC — que es el material de las colchonetas y cojines de aire — no lo mezcle ni lo alterne con alcohol, solventes o blanqueador: resecan el material y lo agrietan.