

COJÍN QUBIX OPTIMUM

Doce celdas de gel que se retiran para descargar una lesión

MÁXIMA PROTECCIÓN DE LA PIEL — para riesgo extremo de úlcera por presión en sedestación prolongada

El Qubix Optimum es el escalón más alto de la línea Grand Healthcare en protección de la piel. Su superficie no es una pieza maciza: son **doce celdas independientes de gel fluido**, de 8 × 8 × 3 cm, que se retiran y se vuelven a poner sobre una base de espuma contorneada.

Si el paciente tiene una úlcera sobre el isquion, **se retiran las celdas que quedan justo encima de esa zona**. El área deja de apoyar por completo: no recibe menos presión, no recibe ninguna. El peso se reparte en el resto del cojín. Cuando la lesión cierra, las celdas se devuelven a su lugar.

Por eso acompaña el **tratamiento** y no solo la prevención. La espuma de la base lleva **cuñas laterales**, que alinean la pelvis y reducen la abducción de cadera, y un **realce preisquial** al frente, que impide que el cuerpo se deslice y termine cargando todo el peso sobre los isquiones.




Las celdas salen una por una. Cada una se fija con velcro a la base.

✓ **Cuándo se indica.** Riesgo extremo de úlcera por presión con necesidad alta de soporte postural; historia clínica de escaras, anterior o presente; paciente muy pasivo, incapaz de reposicionarse por su cuenta. La configuración de qué celdas se retiran la define el equipo médico o de enfermería a cargo del seguimiento.

! **Cuándo NO usarlo.** Alergia al látex de caucho natural, conocida o sospechada. Personas de más de 100 kg. Casos sin seguimiento clínico: un cojín no reemplaza los cambios de posición ni la revisión periódica de la piel. Si la persona conserva movilidad y su riesgo es bajo o moderado, le corresponde un cojín de la línea Basic Care, Comfort Care o Ergo Gel.

CÓMO ESTÁ HECHO POR DENTRO

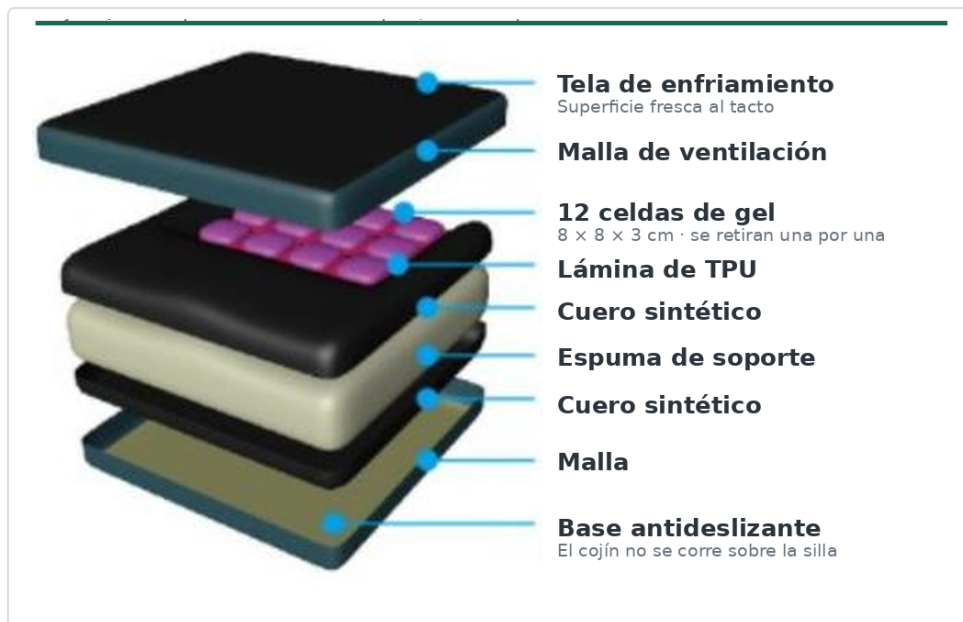


Nueve capas, de la superficie a la base.

Superficie. Funda exterior microclimática en poliéster con elastano y revestimiento interno impermeable, lavable a máquina. Debajo, malla de ventilación y las doce celdas de gel.

Núcleo. Lámina de TPU, cuero sintético y espuma de soporte contorneada. La espuma va con **dobla funda interior**, para que ningún derrame llegue a mojarla.

Base. Cuero sintético, malla y base antideslizante, para que el cojín no se corra sobre el asiento de la silla.

LO QUE CAMBIA EL COJÍN

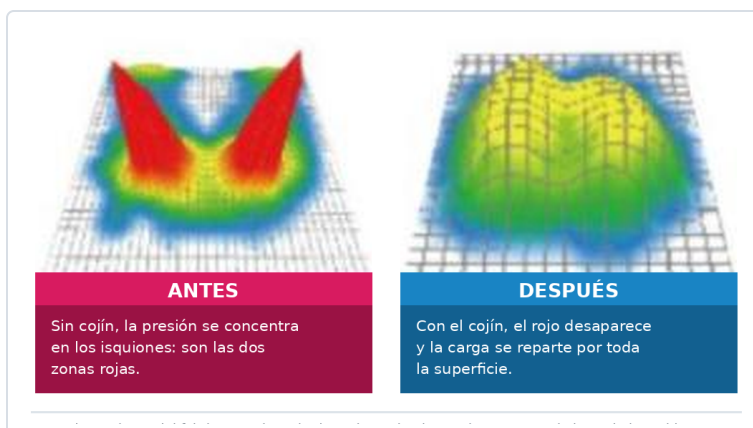

Mapa del fabricante sobre un paciente de 175 cm y 100 kg. El resultado varía según el peso, la postura y el ajuste de las celdas.

ESPECIFICACIONES

COJÍN QUBIX OPTIMUM · REF. GHC-SEAT 001 / GHC-SEAT 001L

Tipo de producto	Cojín de asiento de gel reposicionable con base de espuma contorneada
Superficie	12 celdas independientes de gel fluido, de 8 × 8 × 3 cm, removibles
Núcleo	Espuma de soporte Bestabsorb® contorneada, con cuñas laterales y realce preisquial
Funda	Exterior microclimática en poliéster con elastano, revestimiento interno impermeable, lavable a máquina. Doble funda interior sobre la espuma
Base	Antideslizante
Medidas	GHC-SEAT 001: 40 × 40 × 7,5 cm · GHC-SEAT 001L: 45,5 × 40 × 7,5 cm
Peso del cojín	3,75 kg (001) · 4,15 kg (001L)
Capacidad de peso	Hasta 100 kg
Contiene látex	Sí, látex de caucho natural
Certificaciones	FDA · UL US Listed · CE · ISO 13485
Marca	Grand Healthcare
Registro sanitario	INVIMA 2017DM-0016822
Clasificación de riesgo	I · dispositivo médico no invasivo
Garantía	1 año por defectos de fabricación

CUIDADO Y LIMPIEZA

La funda

Se retira y es lavable a máquina.
No la planche.

Celdas y base

Paño húmedo con jabón neutro.
Secar a la sombra. **No sumergir**
ni usar solventes.

Revisión

Verifique cada cierto tiempo que las celdas sigan bien adheridas y que ninguna tenga fugas.

! **Precauciones.** Mantenga el cojín lejos de objetos punzantes, del sol directo y de fuentes de calor. **No lo use con celdas faltantes por fuera de la configuración indicada** por su equipo de salud; las celdas que retire guárdelas en un lugar seguro, son parte del cojín. Producto de uso individual: no se comparte entre pacientes sin desinfección previa.

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2017DM-0016822 · REF. GHC-SEAT 001 / 001L

Página 3 de 3